

取扱説明書

電動耳かき器 **ピュアイヤー**

PURE EAR

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

△ご使用上の注意

本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害について弊社は
その責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 耳を掃除する目的以外には使用しないでください。
- 分解・改造・修理はしないでください。
- ご使用前に本製品に変形・破損が無いか、また、本体・フィルター・ノズルが正常に取り付けられているかをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。異常に気がつかずに使用を続けることケガなどの思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。
- ご使用ごとにぐらつき等、異常がないか点検を行い、汚れは定期的に取り除いてください。
- 本製品は一人用です。他の人とノズルを共有しないでください。
- 鼓膜に傷などがある方は使用しないでください。
- 耳に痛みなど異常がある場合は、専門医師にご相談の上使用してください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところ、ベッドの近くで使用しないでください。
- お様が使用する場合は、保護者の方が行ってください。
- ご使用中に人や物にぶつからないように、安全な場所に座って使用してください。
- 本製品は振動します。落としたり、耳の奥に入れ過ぎないようにしっかりと握ってください。
- 浴室や湿度の高い場所、火気のそばでは使用しないでください。
- 湿性耳垢の方は、ノズルとフィルターが詰まらないように注意してください。
- 長時間のご使用はおやめください。耳孔内のトラブルを引き起こすおそれがあります。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 落とす、投げる、ぶつける、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。破損・変形の原因となります。
- 本製品が濡れた状態や汚れたままで使用しないでください。
- 破損した場合は、使用を中止して速やかに廃棄してください。
- ご使用後は電源をOFFにし、製品を清潔に保つために、ノズル・フィルター・吸込口のお手入れを行ってください。
- 本体は防水仕様ではありません。絶対に丸洗いをしないでください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。同じ場所に長時間接していると色移りする場合があります。
- お様の手の届かない所に保管してください。
- 火気の近くや、高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

電池に関する注意事項


- 電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。●充電電池は使用しないでください。●電池の+、(プラス・マイナス)は正しくセットしてください。●電池を入れる際につぎと感じた場合は、無理にはめ込んでください。(一部の電池は、性能向上につき国際規格での外寸寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法の兼ね合いで電池が入りにくく、取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為) ●電池の残量が少なくて振動しない、吸引しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池に交換してください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに大量の水で流した後に、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

電池の交換方法

- ①電池カバーを矢印の方向にスライドします。
- ②電池ボックスに単4電池×1本(別売)の+、-を正しくセットし、電池カバーをはめてください。




各部名称

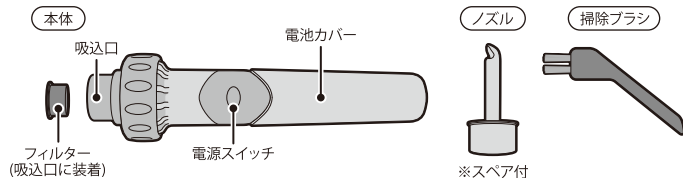

セット内容 本体…1個 / ノズル…2本 / 掃除ブラシ…1本 / 収納ケース…1個 / 取扱説明書(本書)…1枚

使用方法

- ①付属のノズルを本体の吸込口に取り付けます。
- ②電源スイッチを1回押し、電源をONにします。
- ③本体を水平に持ち、ノズルの先端で耳の中を軽くひっかくように往復させてください。
- ④ご使用後は電源スイッチを押し、電源をOFFにしてください。

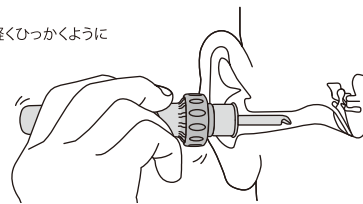

- ※振動により耳の内側に付着している耳垢を落とし、ノズルの先端から吸込みます。
- ※力を入れて使用しないでください。耳の中を傷つける恐れがあります。
- ※耳の形状は個人差があります。先端部を無理に奥まで押し込まないでください。

お手入れ方法

- ※ご使用後は電源をOFFにし、製品を清潔に保つために、ノズル・フィルター・吸込口のお手入れを行ってください。
- ※本体は防水仕様ではありません。絶対に丸洗いをしないでください。

- 吸込口の汚れは掃除ブラシで取り除いてください。
- ノズルとフィルターは水洗いが可能です。水洗い後は水気が残らないよう充分に乾燥させてください。



- ※イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。
- ※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

製品仕様

本体サイズ	約Φ2.5×H10cm	主材質	ABS, PP, TPR
ノズルサイズ	約Φ1.5×H3.5cm	電源	単4電池×1本(別売)
重量	約55g(総重量)		

発売元:株式会社アクセル
〒541-0058

大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

0120-412-917

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行致しませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。

ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代等をご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1



0120-412-917

【お問い合わせ】
月～金（祝日除く）10:00～17:00

商 品 名	電動耳かき器 ピュアイヤー (品番:AXL-644)
購 入 日	年 月 日
保 証 期 間	お買い求め日より6ヶ月
氏 名	
住 所	〒
電 話 番 号	
販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け) ▲店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。	

印

※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。