

# ピカッと耳かきセット


LIGHTED EAR PICK SET

## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本製品の誤った使用により生じた事故や直接、間接の損害について  
弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## セット内容・各部名称

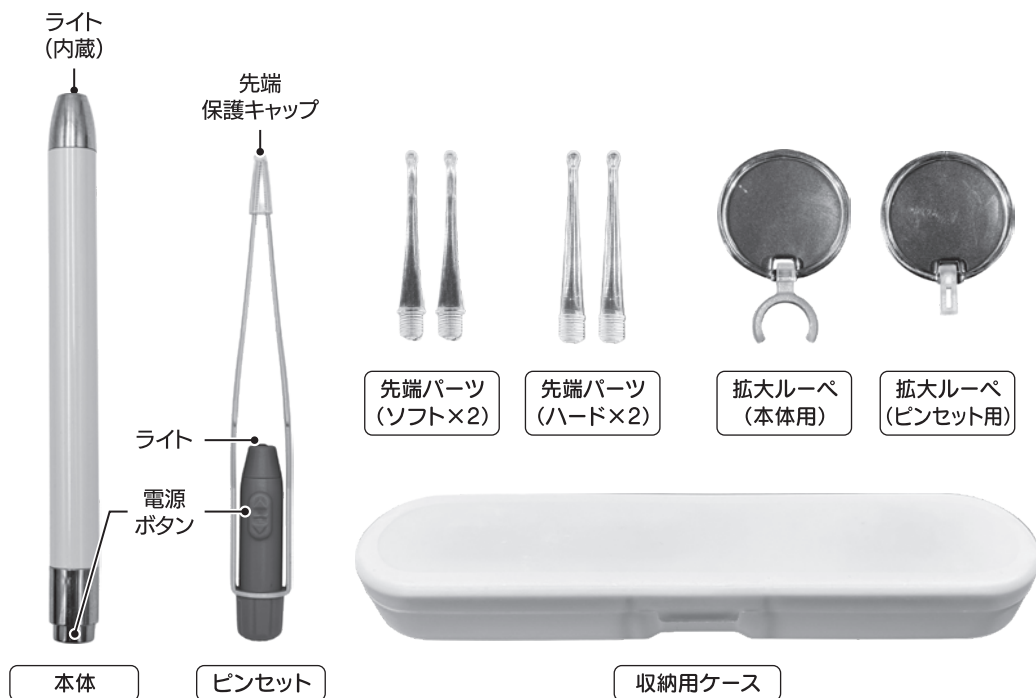

| 製品仕様 |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ  | 本体:約Wφ1×H13.5cm<br>ピンセット:約W1.5×H12cm<br>先端パーツ:約4.5cm(全長)<br>拡大ルーペ:約φ3cm<br>ケース:約W4×D2×H17.5cm |
| 重量   | 約55g(総重量)                                                                                     |
| 主材質  | アルミニウム・ステンレス鋼・PP・TPR・PC・PS                                                                    |
| 電源   | 本体:単4電池×2本(別売)<br>ピンセット:ボタン電池LR41×3個(テスト用電池内蔵)                                                |

※写真はイメージです。  
実際の商品と多少異なる場合がございます。  
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が  
変更される場合があります。  
あらかじめご了承ください。

## 電池の入れ方・交換方法

### <本体(耳かき)の場合>


- ①本体の下部のキャップを回して開けてください。
- ②単4電池×2本(別売)をイラストのように入れて  
キャップを回して閉めてください。



### <ピンセットの場合>

- ①ピンセットの下部のキャップを回して開け、3つのパーツに分けてください。
- ②電池ホルダーを開けてボタン電池(LR41)×3個をイラストのように入れて、①と逆の手順で取り付けてください。

テスト用電池内蔵のため、初めてご使用する際は必ず絶縁シートを取り外してください。

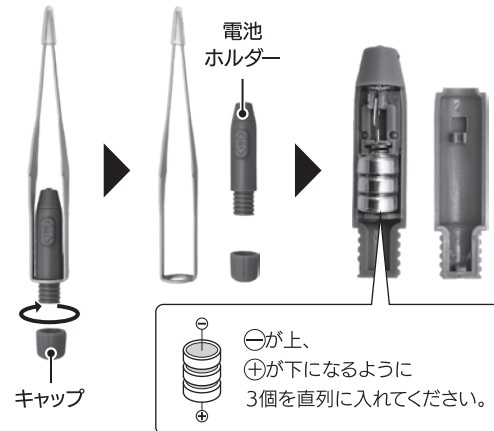

## ⚠ 電池に関する注意事項

- ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れてください。
- 古い電池と新しい電池や、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ＋、－を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を外してください。
- 電池を入れる際にきつと感じた場合は、無理にはめしないでください。


## ご使用方法

### <本体(耳かき)の場合>

- ①本体に先端パーツ(ソフトまたはハード)を回して挿し込んでください。
  - ②電源ボタンを押して、LEDライトを点灯してご使用ください。
- ※本体用拡大ルーペを取り付けてからご使用すると、耳の中がさらに見やすくなります。

### <ピンセットの場合>

電源ボタンをスライドさせて、LEDライトを点灯してご使用ください。  
※ピンセット用拡大ルーペを取り付けてからご使用すると、耳の中がさらに見やすくなります。  
※精密な作業を目的としていない商品のため、噛み合わせがピッタリと合わない  
可能性がございます。  
その際は先端の両サイドから圧をかけるなど微調整をしてください。

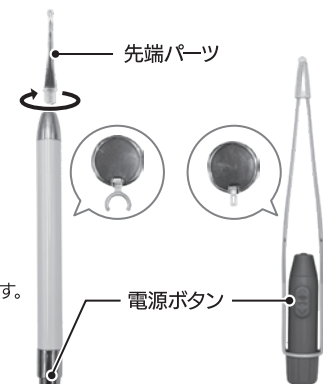

## ⚠ 使用上のご注意

※ボタン電池を飲み込むと大変危険です。

万一ボタン電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

※本製品を耳の奥まで入れすぎないでください。

※強い力で掃除すると、皮膚をキズ付けてしまう恐れがありますのでご注意ください。

※耳にキズや疾患がある場合は使用しないでください。

- LEDライトの光を直接見つめたり、人や動物に向けないでください。  
失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。
- ご使用する際は、人や物にぶつかったりしないように周囲の状況にご注意ください。
- 製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。  
ご使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- ご使用前に本製品に変形・破損などがないかご確認ください。  
異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品を使用中に異音・異臭・煙が発生した場合は、ただちに使用を中止し電源をOFFにしてください。
- 不慣れな方だけで使用させたり、小さなお子様や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。  
多湿なお風呂場、屋外の降雨下での使用、放置はしないでください。
- 故障や感電事故の原因となりますので、濡れた手で扱わないでください。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 本製品の上に乘ったり、物を置かないでください。
- ご使用の際は、必要以上の力を加えないでください。
- LEDライトは消耗品です。長時間点灯させるとライトの光が弱くなります。  
また、本製品のLEDライトの交換はできません。
- 本体に異常がないか定期的に点検を行い、汚れやホコリなどは取り除いてください。
- お手入れの際は、必ず乾いた布で拭いてください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 同じ場所に長時間接していると色移りする可能性があります。
- 長期間使用しない場合は、電池を本体やピンセットから取り外し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 火気の近くや車中など高温となる場所、多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## お問い合わせ先

**発売元:株式会社アクセル**

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1

フリー  
アクセス

**0120-412-917**

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)10:00～17:00

## 【保証書】

この度はお買い上げいただき有り難うございます。

保証書は、必ず「販売店名」「購入日」などをご確認いただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証書は再発行いたしませんのでご注意ください。

部品不足、異常や故障が生じたとき、正常な使用状態において製造上の不備による欠陥や損傷が発生した場合は本商品の無償交換対応をいたします。  
ご購入後、すぐに商品を開梱していただき商品に不備がないかご確認ください。但し、次の場合は保証期間中であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

※内容により返送用の送料や一部部品代などをご負担いただく場合がございます。

1. 火事や地震、落雷などの天災・自然災害により生じた故障や損傷。
2. 誤った取扱いにより生じた故障や損傷。
3. 本商品の素材の経年による劣化や使用中に生じたキズなど外観上の変化。
4. お客様による修理や改造による故障や損傷。
5. 一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
6. 保証書を紛失された場合、又は保証書及び購入レシートをご提示いただけない場合。
7. ご購入日・販売店名が確認できない場合。
8. 未使用品であっても、フリーマーケット・リサイクル・個人売買および譲渡のできる、インターネットや店舗で入手された場合。
9. 消耗品や正常な部品の交換対応。
10. 未使用であっても保証期間が過ぎている場合。

**発売元:株式会社アクセル 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-5-1**

フリー  
アクセス

**0120-412-917**

【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く) 10:00～17:00

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 商 品 名                                                         | ピカッと耳かきセット (品番:AXL-844) |
| 購 入 日                                                         | 年 月 日                   |
| 保 証 期 間                                                       | お買い求め日より6ヶ月             |
| 氏 名                                                           |                         |
| 住 所                                                           | 〒                       |
| 電 話 番 号                                                       |                         |
| 販売店名・取り扱い店名/印(またはレシート貼り付け)<br>⚠ 店舗印またはレシートの貼り付けが無い場合、対応出来ません。 |                         |



※購入日に関わらず、販売が終了し対応商品がご用意できない場合、同等商品または別の商品にてご対応させて頂く場合がございます。予めご了承ください。